


Návod k použití

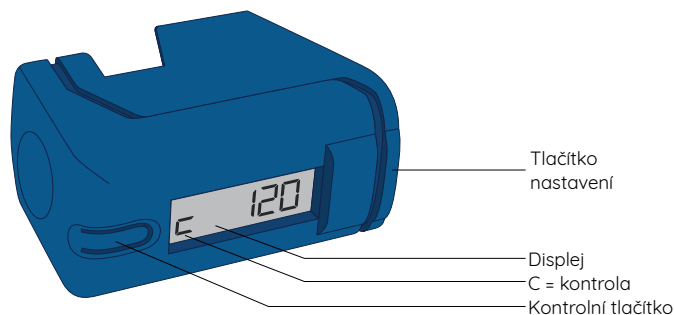

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Přístroj CountAir® počítá pouze zbývající dávky v inhalátoru.

Téměř na 100 % přesně, ale není možné, že by jich ukazoval menší počet.

CountAir® nemá vliv na funkčnost inhalátoru ani na tlak, který je potřeba vyvinout k inhalaci dávky.

CountAir® je zdravotnický prostředek.

CountAir® je registrovaná ochranná známka.

Doporučujeme vám uchovat si obal přístroje CountAir®. Referenční číslo na obalu je požadováno v případě dotazů či stížností.

Datum revize: listopad 2019

Pokud došlo v souvislosti s použitím přístroje CountAir® k závažnému incidentu, neprodleně oznamte tuto skutečnost výrobci a příslušnému vnitrostátnímu orgánu.



Spruyt hillen bv
Tinbergenlaan 1
3401 MT IJsselstein, Nizozemsko
www.countair.nl


Co je CountAir®?

CountAir® je zdravotnický prostředek, speciálně vyvinutý pro všechny pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a astmatem, kteří používají aerosolový inhalátor bez integrovaného počítadla. Jedná se o inhalátor s lékem, který nyní používáte. Také se mu často říká ruční inhalátor.

CountAir® počítá a ukazuje počet dávek. Na jeho displeji se zobrazuje, kolik dávek vám v inhalátoru ještě zbývá, přičemž odpočítává směrem k nule.

Pro každý inhalátor použijte jeden CountAir®. Dostupný je v modré a bílé barvě.

CountAir® lze použít v kombinaci s následujícími inhalátory.

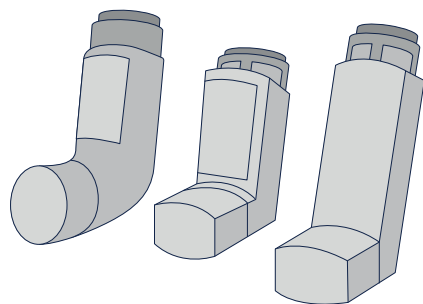


1 Nastavení CountAir®

CountAir® nemá tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí a po nastavení je okamžitě připraven k použití.


Pozorně si prohlédněte počet dávek na obalu nebo na inhalátoru a toto číslo si zapamatujte.

Pokud je displej přístroje CountAir® zapnutý, počkejte 10 sekund, dokud se nevypne.

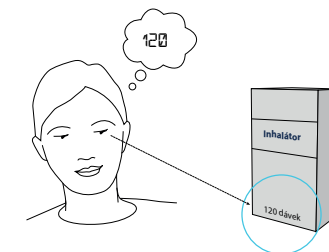


Krok 1

Stiskněte tlačítko nastavení na přístroji CountAir® a podržte ho stisknuté.

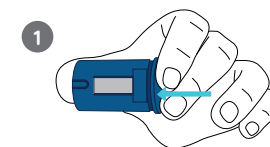

Krok 2

Poté jednou stiskněte kontrolní tlačítko. Na displeji se postupně objeví následující čísla: 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220.

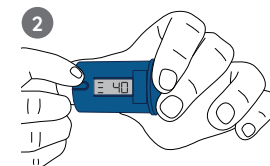


Krok 3

Až se na displeji objeví správné číslo (počet dávek vašeho inhalátoru), uvolněte tlačítko nastavení. Tím je nastavení přístroje CountAir® dokončeno.



Krok 4

Stisknutím kontrolního tlačítka teď můžete zkontrolovat, zda je nastaveno správné číslo. Zkontrolujte, zda je písmeno C na displeji vlevo.

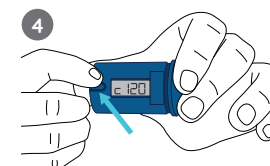


Tak máte jistotu, že čísla na přístroji CountAir® čtete správně. Pokud tomu tak není, zopakujte výše uvedené kroky.

Přístroj CountAir® můžete nastavovat kdykoli, a to i v případě, že je na displeji zobrazen zbývající počet dávek.




Přístroj CountAir® je standardně nastaven pro praváky. Pro leváky lze displej nastavit i tak, aby zobrazoval číslice otočené o 180 stupňů. Postup je následující: Počkejte, dokud nebude displej prázdný. Poté stiskněte kontrolní tlačítko a podržte ho stisknuté. Nyní jednou stiskněte tlačítko nastavení, dokud se displej neotočí o 180 stupňů.

2 Umístění inhalátoru

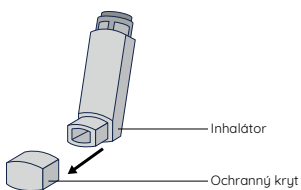


Z inhalátoru sejměte ochranný kryt a vložte ho do přístroje CountAir®.

Zkontrolujte, zda je inhalátor v přístroji CountAir® správně zasazen a znovu nasadte kryt na náustek.

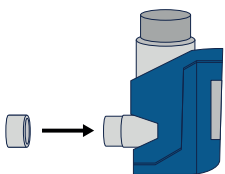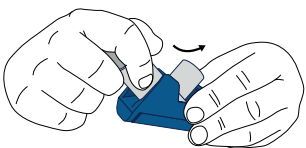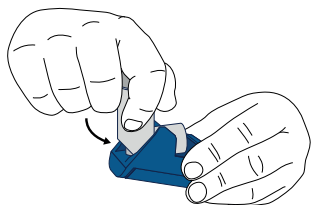


3 Připraven k použití

Váš inhalátor je nyní připraven k použití podle pokynů vašeho lékaře, lékárníka nebo ošetřovatele. Pozor! Nezapomeňte nový inhalátor před použitím protřepat a odstříknout 3 dávky naprázdno do vzduchu.

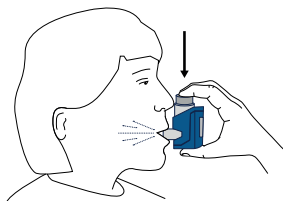

Pokud máte inhalační nástavec, můžete ho nyní použít tak, jak jste zvyklí.

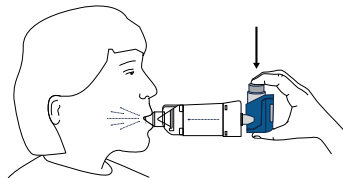


Po vdechnutí se po dobu 10 vteřin na displeji zobrazí počet zbývajících dávek. Toto číslo se také objeví po stisknutí kontrolního tlačítka.




Po použití sejměte náustek pomocí suchého kapesníčku.

4 Výměna inhalátoru

Při každém vdechnutí odpočítává přístroj CountAir® počet dávek až do vyprázdnění inhalátoru. Po poslední dávce se na displeji objeví 4 vodorovné čárky vedle sebe, které značí, že inhalátor je potřeba vyměnit.

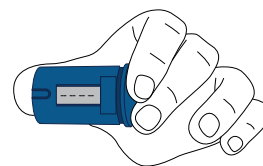

Sejměte z inhalátoru ochranný kryt a vyjměte ho z přístroje CountAir®.

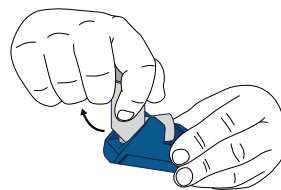


Po výměně inhalátoru znovu nasadte ochranný kryt na náustek. Prázdný inhalátor vyhodte buď do běžného odpadu nebo ho můžete odevzdat v lékárně, pokud v něm zůstal zbytek léčiva.

Znovu nastavte počet dávek tak, jak je uvedeno výše (viz kroky 1-4). Zkontrolujte, zda je na displeji zobrazen stejný počet dávek jako u předchozího inhalátoru, a pokud tomu tak není, zda nemáte náhodou jiné balení.



5 Uchovávání přístroje CountAir® s inhalátorem

Přístroj CountAir® je po nasazení aerosolového dávkovače vždy připraven k použití a v akutních situacích nebude blokovat inhalaci. To je vědomá volba. V případě paniky je CountAir® připraven k použití. Uchovávejte přístroj CountAir® spolu s aerosolovým dávkovačem například v nějaké taštičce. Zabráníte tak znečištění nebo nechtěné aktivaci přístroje CountAir® a aerosolového dávkovače.

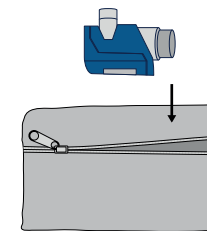

Čištění

V případě potřeby lze CountAir® vyčistit vlhkým hadříkem. Pozor! Neoplachujte vodou, protože CountAir® není vodotěsný.

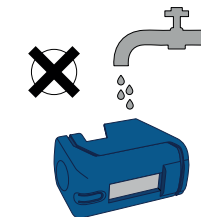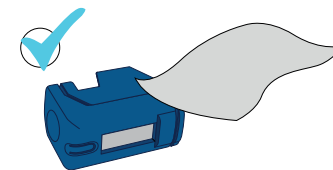

Životnost baterie

Při běžném používání je životnost baterie minimálně 2 roky.

Pokud je baterie téměř vybitá, objeví se na displeji 2 vertikální proužky.

Je na čase CountAir® vyměnit za nový. Jinak hrozí, že přístroj nebude zobrazovat správný počet zbývajících dávek.

Baterii nelze vyměnit. CountAir® odevzdejte na sběrném místě elektroodpadu ve vaší obci.

